



Bedienfeld

Einstellen der Spülung

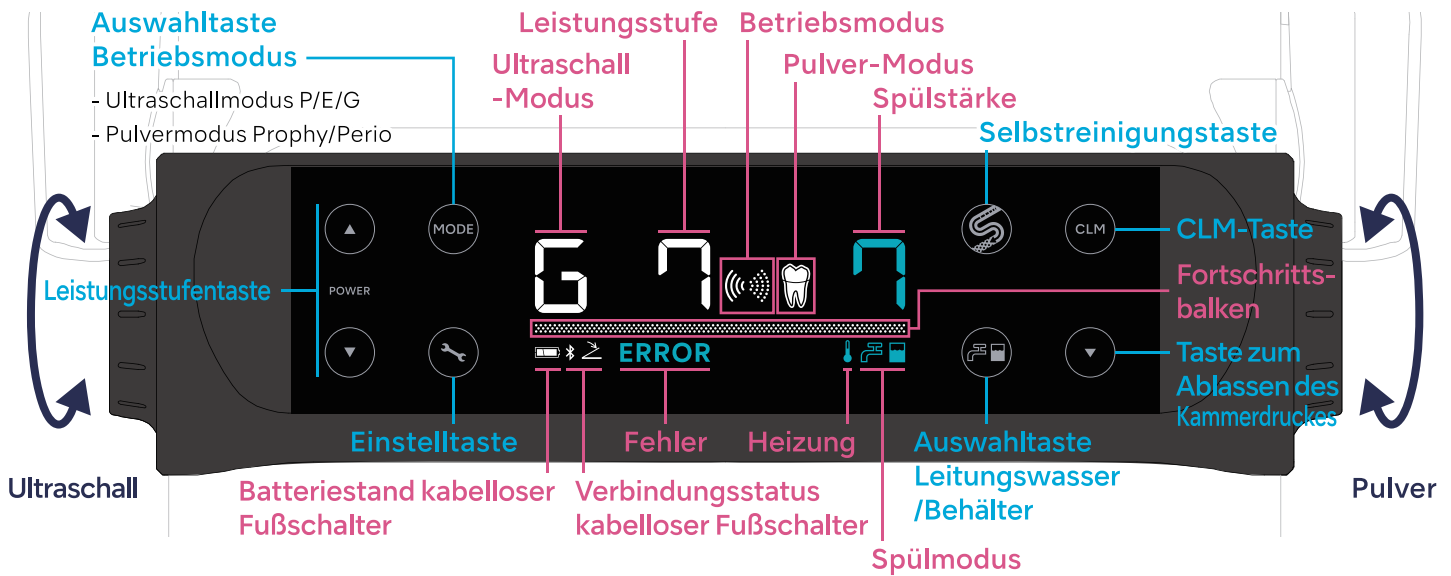


Fußschalter

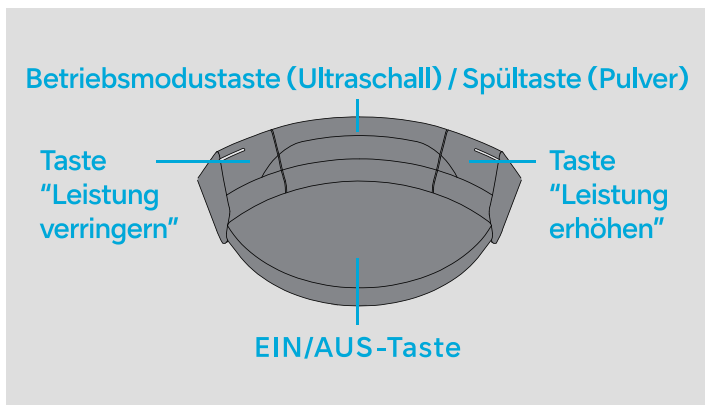

Verwendung des Ultraschall-Modus


- 1 Halten Sie das Ultraschallhandstück.
- 2 Wählen Sie den Ultraschallmodus (P/E/G).
- 3 Stellen Sie die Leistungsstufe ein.
- 4 Wählen Sie die Spülmethode.
- 5 Stellen Sie die Spülstärke ein.
- 6 Betätigen Sie die EIN/AUS-Taste.

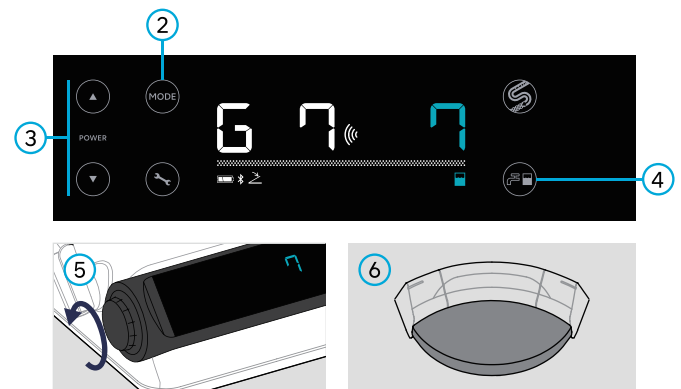

Verwendung des Pulvermodus

Modus	Kammer	Handstück	Düse	Verwendung	Pulver


- 1 Halten Sie das Pulverhandstück.
- 2 Wählen Sie den Pulvermodus (Prophy / Perio).
- 3 Stellen Sie die Leistungsstufe ein.
- 4 Stellen Sie die Spülstärke ein.
- 5 Betätigen Sie die EIN/AUS-Taste.

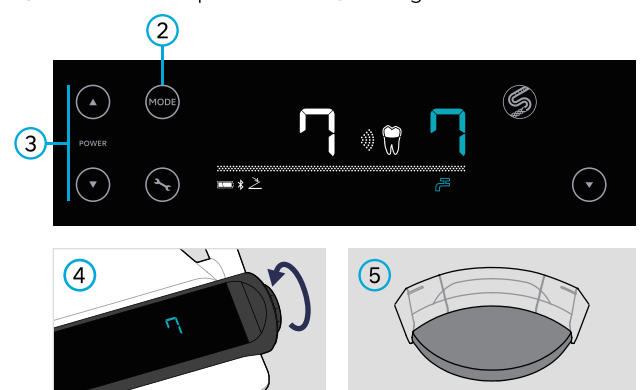

Selbstreinigung(Auto-Cleaning)

	Häufigkeit der Durchführung	Ist-Nutzung des Varios Combi Pro2		
		Ultraschall und Pulver	nur Pulver	nur Ultraschall
Erforderlicher Auto-Cleaning Modus	Nach jd. Behandlung	W(Pulver)	W(Pulver)	—
	1x täglich (nach d. letzten Behandlung)	D	P	W (Ultraschall)


W (Ultraschall-Seite) : Entfernung von Wasser
W (Pulver-Seite) : Entfernung von Wasser und Ausblasen von Pulver
P : Entfernen von Wasser aus dem Handstückschlauch
Entfernung von Pulver aus dem Pulverkreislauf
Ablassen des Kammerdrucks
D : Entfernen von Wasser aus dem Handstückkabel/-schlauch
Entfernung von Pulver aus dem Pulverkreislauf
Ablassen des Kammerdrucks

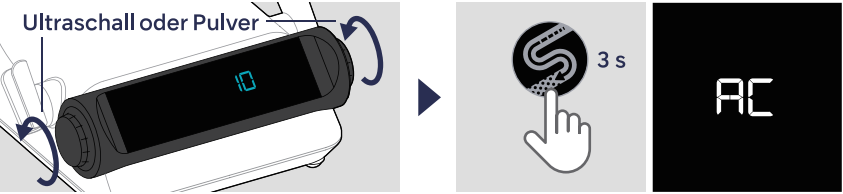

Stellen Sie die Spülstärke auf 10. Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis „AC“ angezeigt wird.




Wählen Sie „W“. Stecken Sie das Handstück mit Kabel oder Schlauch in die CLM-Halterung. Tippen Sie. Nachdem „Fin“ angezeigt wird, drücken Sie.

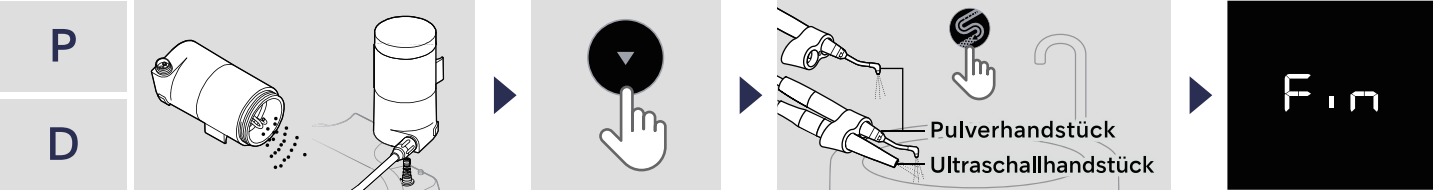


Entsorgen Sie das Pulver und setzen Sie die Kammer ein. Wählen Sie „D“ oder „P“. Stecken Sie die Handstücke mit Kabel/Schlauch in die CLM-Halterung. Drücken Sie. Nachdem „Fin“ angezeigt wird, drücken Sie.


Dekontamination / Verhinderung von Biofilmbildung(CLM-Modus)

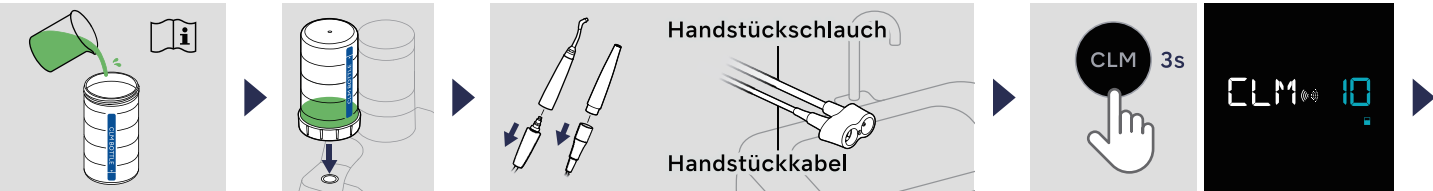

Befüllen Sie den CLM-Behälter mit b.clean oder Bilpron (ALPRO) (unverdünnt). Setzen Sie den CLM-Behälter ein. Entfernen Sie das Handstückkabel/-schlauch von jedem Handstück und setzen Sie diese in die CLM-Halterung ein. Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis die obige Anzeige erscheint.

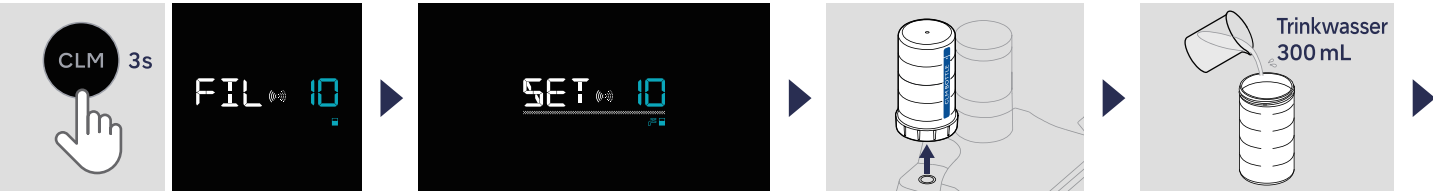

Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis der CLM-Modus startet. Nachdem die obige Anzeige erscheint, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 12 Stunden oder länger. Schalten Sie den Strom ein. Nehmen Sie den CLM-Behälter ab. Füllen Sie den desinfizierten Spülbehälter mit Trinkwasser.

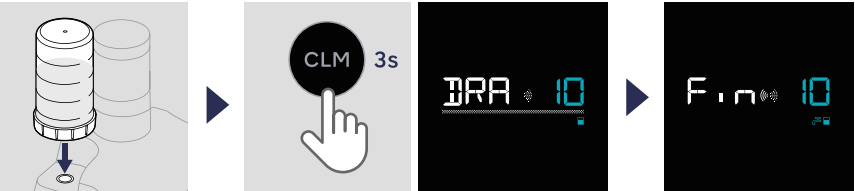

Setzen Sie den Spülbehälter ein. Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis die Entleerung beginnt. Der CLM-Modus ist beendet, wenn die obige Anzeige erscheint. Betätigen Sie, um in den normalen Betriebsmodus zu wechseln.