



## Teilebezeichnung

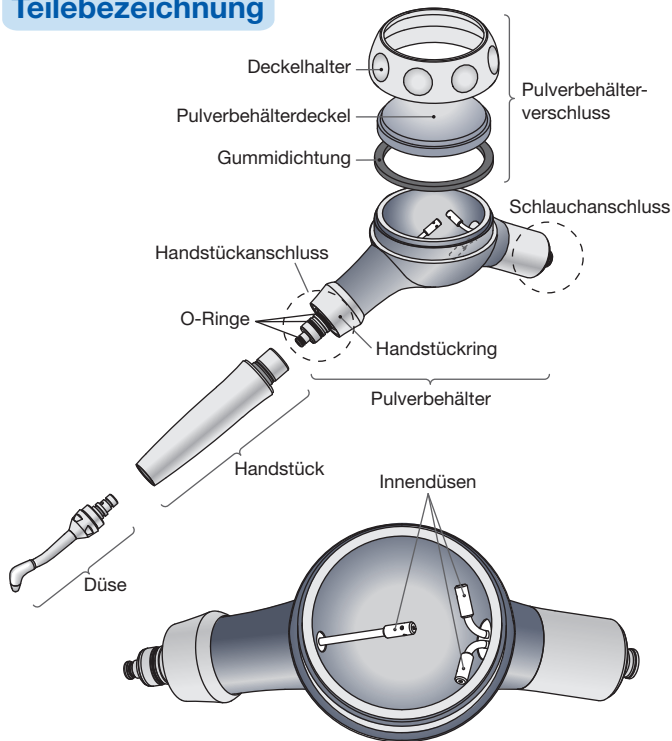

## ⚠ Vor Benutzung



Vor der Benutzung die Kupplung, das Handstück, den Schlauchanschluss des Pulverbehälters und das Innere des Pulverbehälters immer sorgfältig trocknen lassen.




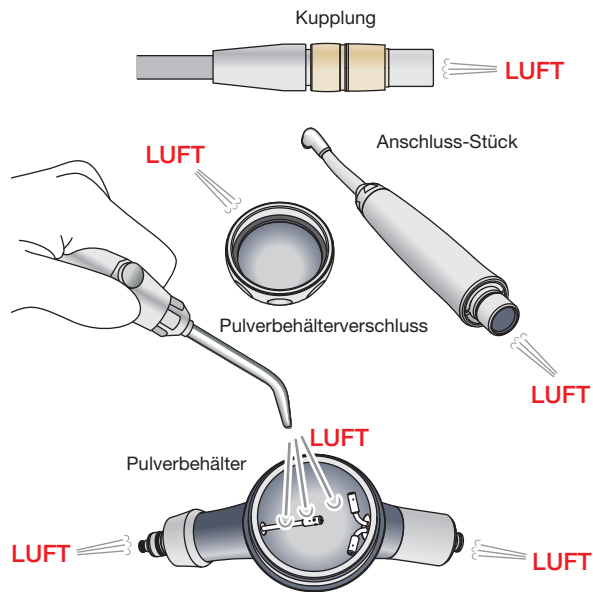


# Pflege nach dem Gebrauch





## ⚠ Vorsicht

- Prophy-Mate neo nach jedem Patienten aufbereiten. Eine regelmäßige Wartung wird empfohlen (andernfalls kann es zu Fehlfunktionen wie z.B. Pulververstopfungen oder Wasseraustritt etc. kommen)
- Wenn Pulver in der Pulverkammer oder im Handstück verbleibt, bildet es Klumpen und kann ein Verstopfen verursachen.
- Vor der Benutzung, Kupplung, Handstück, Schlauchanschluss der Pulverkammer, die Pulverkammer innen und die Düse gründlich trocknen. Leerlauf nur mit Luft durchführen, um eventuell in den Kanälen vorhandene Feuchtigkeit zu entfernen.
- Sicherstellen, dass 1 x wöchentlich eine Ultraschallreinigung durchgeführt wird, um Verstopfungen zu vermeiden. Anschließend alle Teile sorgfältig trocknen lassen. (siehe Gebrauchsanleitung 5-1).

## 1 Entfernung des Pulvers (Siehe Gebrauchsanleitung 4-1-4-2)

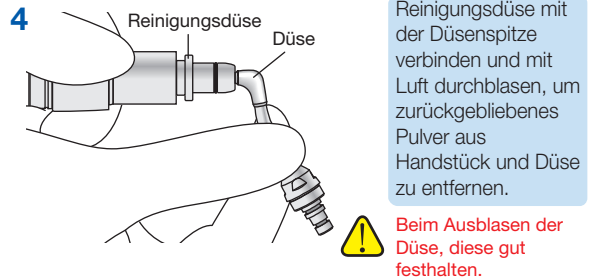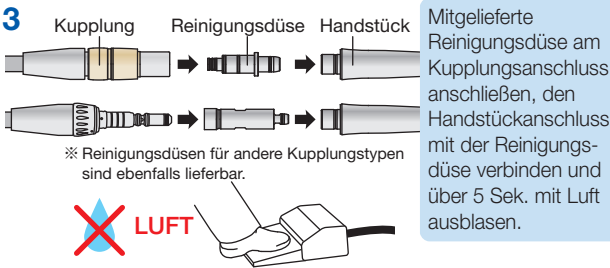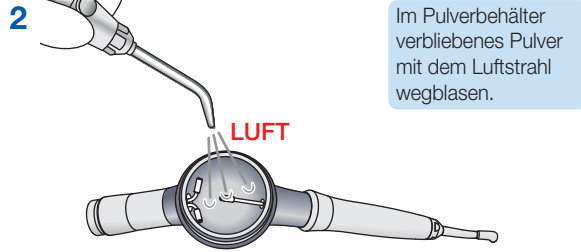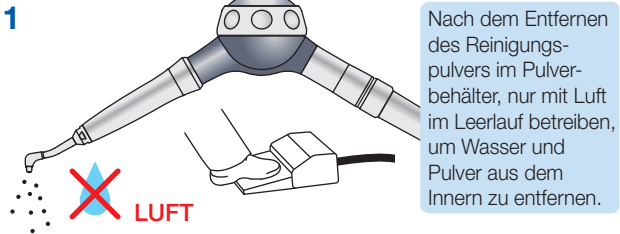

## 2 Reinigen (Siehe Gebrauchsanleitung 4-3-4-4)

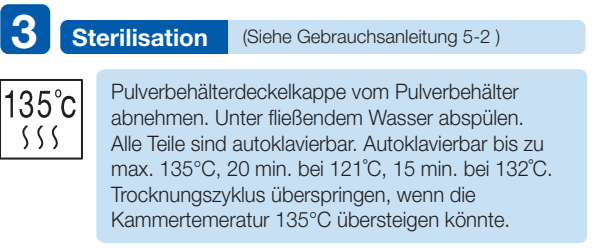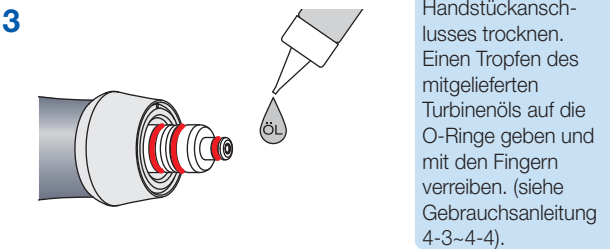
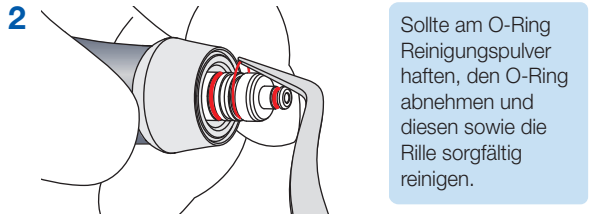
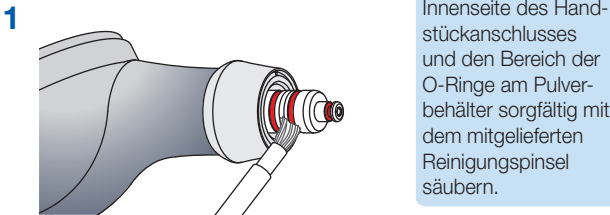


⚠ Wird der O-Ring nicht geschmiert, so kann die Verbindungsstelle beschädigt werden, sich schwer drehen lassen oder sogar leak werden.

## Ultraschallreinigung (Siehe Gebrauchsanleitung 5-1)

⚠ 1x wöchentlich durchführen, um ein Verstopfen zu Vermeiden.




Vor der Ultraschallreinigung Reinigungspulver entfernen und Reinigung unter fließendem Wasser durchführen.

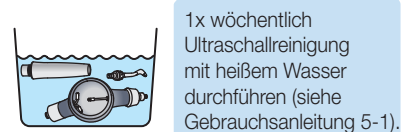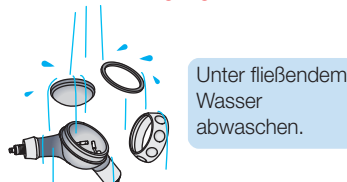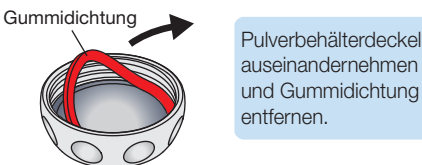

# Problembeseitigung

## Pulververstopfung (Siehe Gebrauchsanleitung 6, 5-1~5-2)


**1** Pulver mit dem mitgelieferten Reinigungsdraht entfernen.

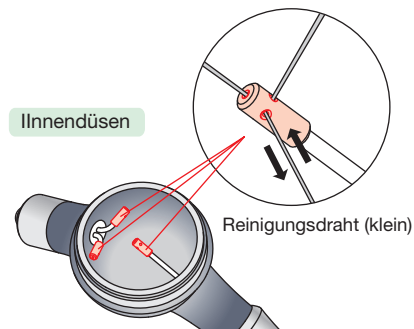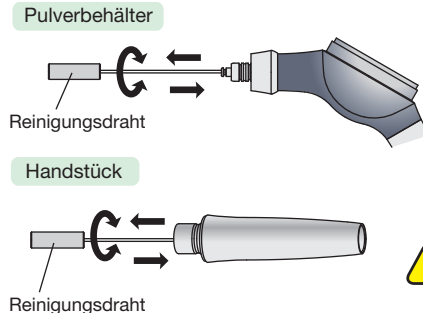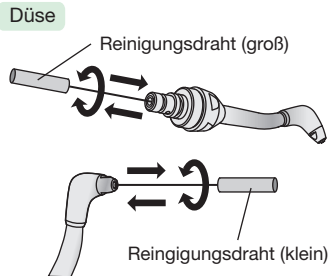

Wenn zu viel Kraft ausgeübt wird, kann sich der Draht verbiegen.

**2** Führen Sie eine Ultraschallreinigung und eine Sterilisation im Autoklaven durch, nachdem Sie das verfestigte Pulver entfernt haben.

## Wasseraustritt (Siehe Gebrauchsanleitung 4-3~4-4)

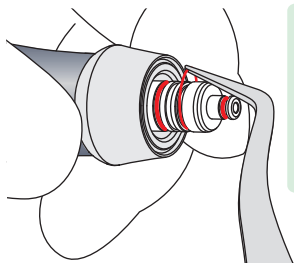

O-Ringe im Bereich des Handstückanschlusses der Pulverkammer ersetzen. Einen Tropfen des mitgelieferten Turbinenöls auftragen und mit dem Finger vereiben.



## Vorsicht

- Grundlegende Wartungsschritte sind im Wartungsbuch beschrieben.
- Für weitere Informationen bitte in der Gebrauchsanleitung nachschlagen.
- Gebrauchsanleitung und Kurzanleitung griffbereit zum Nachschlagen aufheben.
- 1x wöchentlich Ultraschallreinigung durchführen, um Pulververstopfungen zu vermeiden (siehe Gebrauchsanleitung 5-1).